

ハイブリッド型 弾性チューブ包帯 KチューブTM

やさしくフィット



- スキンテア予防に
- リンパ浮腫等の軽圧迫に
- 就寝時の軽圧迫に
- スキントラブル予防に
- 圧迫治療の補助に
- 静脈疾患予防に
- ガーゼ等の固定に
- 外部刺激からのお肌の保護に
- 弾性着衣の装着が困難な方に
- 下腿潰瘍の圧迫治療の補助に
- リンパ漏のケアに
- アトピーの皮膚保護に

切ったり、重ねたり、
用途に合わせて
使い方いろいろ……

優れた高機能性

抗菌防臭
加工付き

ラテックス
フリー

吸湿速乾
繊維使用


ソフトな
肌ざわり

両端ほつれ
防止加工

※カットしてご使用の場合を除きます。

抗菌糸使用により、黄色ブドウ球菌・MRSA・緑膿菌・大腸菌等への抗菌効果あり

抗菌性試験DATA (試験菌: MRSA) JIS L 1902

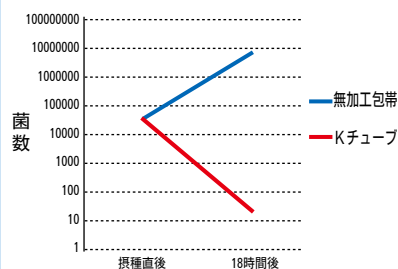

K MEDICALCARE


越屋メディカルケア株式会社

製品ラインナップ

規格	JANコード	幅	長さ	適用周径目安	標準価格(税抜)
2号(D)	4580362080040	7.5cm	1 m	15～32cm	¥ 1,400
3号(E)	4580362080057	8.75cm	1 m	17.5～37cm	¥ 1,400
4号(F)	4580362080064	10cm	1 m	20～42cm	¥ 1,400
5号(G)	4580362080071	12cm	1 m	24～51cm	¥ 1,500
6号(H)	4580362080088	15cm	1 m	30～64cm	¥ 1,500

使用手順の一例


腕の場合 折り返して二重に使用するパターン

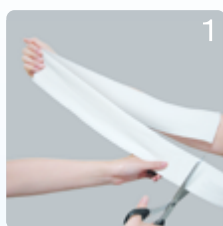


①長い場合は必要な長さにカットします。




②生地を半分を腕に通します。

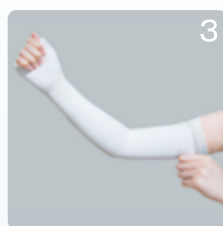

③残り半分の折り返ししながら上に引き上げます。

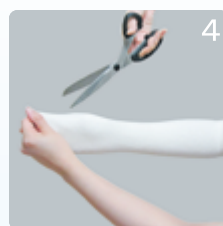

④親指を出す部分に切り込みを入れてください。

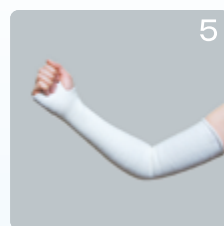

⑤親指を通します。生地にシワがないかを確認してください。

脚の場合



①長い場合は必要な長さにカットします。



②生地にシワができないように引き上げ、装着してください。

使用上の注意

両端ほつれ防止加工をしていますが、カットした部分はほつれます。

上記使用手順は一例になりますので、その他装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用下さい。



< 関連商品 >

ほつれ予防テープ

規格：2m 価格：¥1,200（税抜）

特徴

カットしたチューブ包帯をほつれにくくするテープです。

【取扱方法】



■ 漂白剤および乾燥機の使用は避けて下さい。

■ 手洗い・陰干しを推奨しております。

Made in Japan



【発売元】



越屋メディカルケア株式会社

□ 本部：
〒920-0172 石川県金沢市河原市町1
□ 東京：
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-16 U-natura902
TEL 050-3733-2288 FAX 050-3737-4461
□ 金沢：
〒920-0172 石川県金沢市河原市町1
TEL 076-255-1220 FAX 076-255-2322

□ 富山：
〒939-8208 富山県富山市布瀬町南2-8-11
TEL 076-481-6250 FAX 076-481-6251
□ 福井：
〒918-8237 福井県福井市和田東2-2220
TEL 0776-26-0548 FAX 0776-26-0586
URL: <http://www.koshiya-mc.com/>
E-mail: info@koshiya-mc.com