



ハンドリリース

日本製



空気を利用して
手や指の拘縮を予防する

HIVIX

特長

手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血流の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによる皮膚トラブルを防ぐ効果が期待できます。

POINT 1 指のループで安定感UP

POINT 2 湾曲形状で通気性UP
吸水・速乾性カバー素材でムレ防止

POINT 3 空気だからへたらない
常に柔らかい触り心地



STEP 1 空気を入れる



カバー開口部を開け、空気栓を引き出す。ハンドポンプを差し込み、空気を入れる。

STEP 2 マッサージを行う



使用者の手指を1本ずつゆっくり伸ばし、筋緊張を和らげる。
※無理矢理、手指を伸ばすことはおやめください。

STEP 3 装着する



本製品のループに指を1本ずつ通す。
※手や指を清潔な状態にしてからの装着をおすすめします。
※指つけ根付近まで装着すると、より効果が期待できます。

● 製品仕様 ●



Curaria ハンドリリース (セット) HV-RH002		約 W170×H120×D90	
本体	サイズ(mm)	約 W170×H120×D90	
	材料	エアバッグ	PU
ハンドポンプ	サイズ(mm)	W43×L85	
	材料	ゴム	
カバー		ポリエステル100%	



Curaria ハンドリリース本体 (単品) HV-RH003		約 W170×H120×D90	
本体	サイズ(mm)	約 W170×H120×D90	
	材料	エアバッグ	PU
カバー		ポリエステル100%	



Curaria ハンドポンプ (単体) HB-523B		W43×L85	
ハンドポンプ	サイズ(mm)	W43×L85	
	材料	ゴム	

▲ 警告

- ❗ 正しくお使いいただくために医療従事者の指導のもと、行ってください。
- ❗ 本製品は、手指拘縮予防用の装置です。本来の用途以外での使用はおやめください。
- ❗ 空気の入れすぎは破裂の原因となり、けがの恐れがありますので十分ご注意ください。
- ❗ 拘縮などの症状には個人差があり、本製品はその緩和や軽減を保證するものではありません。
- ❗ 使用中に異常が見られた場合は、速やかに使用を中断し、医師または専門医にご相談ください。

▲ 注意

- ⊘ 空気栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
- ⊘ 浮き具ではありません。水上での使用はおやめください。
- ⊘ 尖った物や鋭利な物と接触させないでください。破損の原因となります。
- ⊘ 火気の近くや高温多湿・直射日光のあたる場所での保管はおやめください。
- ⊘ 使用状況・保管場所・保管状態によって、色落ち・色移りまたは時間の経過により劣化する場合があります。

contact us

製造販売元

株式会社ハイビックス

〒501-0305 岐阜県瑞穂市宮田245 番地
TEL (058) 328-3131 FAX (058) 328-3136
URL <https://www.hivix.co.jp>
✉ info@hivix.co.jp
原産国：日本